

Anleitung

Blutentnahme und -versand zur Testung mit NEOliquid

 **nowel**
Lungennetzwerk


 **HpH**
Institut für
Hämatopathologie
Hamburg

Anbei finden Sie eine NEOliquid-Box für den Versand der Proben. Diese beinhaltet alle zusätzlich benötigten Materialien, um die Blutprobe eines Patienten abzunehmen und zu versenden.



Verwenden Sie ausschließlich „Cell-free DNA BCT CE“ (Streck) Röhrchen zur Abnahme. Blutproben in anderen Röhrchen (z.B.: K3EDTA, Heparin, etc.) können nicht bearbeitet werden und werden verworfen.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

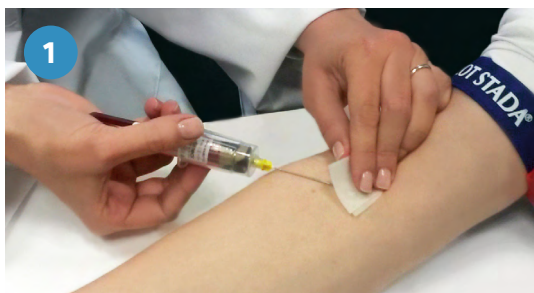

Ein Röhrchen fasst ca. 9 ml Blut, wir benötigen mindestens 18 ml Vollblut pro Patient. Direkt nach der Abnahme müssen die gefüllten Röhrchen 5 x invertiert werden.



Beschriften Sie die Streck-Röhrchen eindeutig mit dem Patientennamen und Geburtsdatum. **Nicht eindeutig gekennzeichnete Blutproben können nicht analysiert werden und werden verworfen.** Stecken Sie die Streck-Röhrchen in die vorliegenden Umröhrchen, verschließen Sie diese gut und legen sie in die zusammengefaltete Kartonbox.



Füllen Sie alle benötigten Formulare sorgfältig und vollständig aus und legen Sie diese der Transportbox bei oder faxen sie an 0800 0005695.



Versenden Sie die Probe umgehend am Tag der Blutentnahme um einen Qualitätsverlust an der Probe zu vermeiden. **Die Probe darf zu keinem Zeitpunkt eingefroren werden.** Verwenden Sie bitte ausschließlich die voradressierten Versandboxen.

Für Fragen kontaktieren Sie bitte jederzeit

NOWEL | Email: info@nowel.org | Tel.: 0800 / 0005605